



ديكتوس فليكس - معلومات المستخدم باللغة العربية

معلومات هامة حول استخدام رباط ديكوتوس

إعلان المطابقة

تعد هذه الجبيرة التقويمية AFO لعلاج سقوط القدم جهازا طبيا من الفئة الأولى، وتفي بالمتطلبات المنطبقة من اللائحة الأوروبية 745/2017 الخاصة بالأجهزة الطبية (MDR). تعد شركة Erimed هي الضامن لهذا المنتج بشرط ألا يتم التعامل مع المنتج بأي طريقة غير تلك المخصصة له. أي تعديلات غير معتمدة على المنتج تجعل هذا الإعلان غير صالح.

الغرض من الاستخدام:

تم تطوير هذا المنتج استنادا إلى اختبارات وتقييمات سريرية من قبل مختصين في المجال. يعد رباط ديكوتوس وسيلة تقويمية تستخدم بشكل أساسي للأفراد الذين يعانون مما يعرف بسقوط القدم. تم تصميم المنتج للمساعدة في رفع مقدمة القدم باستخدام شريط مطاطي ديناميكي.

يتكون رباط ديكوتوس من: حزام للكاحل مصنوع من الجلد المدبوغ طبيعيا والنسيج لتثبيت الفيلكرو، وحلقة D مصنوعة من البلاستيك، وشريط مطاطي مصنوع من اللاتكس والنسيج والفيلكرو، وخطاطيف تثبيت من الفولاذ المقاوم للصدأ، وخطاف أحادي مصنوع من البلاستيك.

القيود:

على الرغم من بذل كل جهد ممكن لتحقيق أقصى قدر من الامتثال من حيث الوظيفة، والمتانة، والراحة، فلا توجد أي ضمانات بأن هذا المنتج سيمنع حدوث أي ضرر. الضمان 12 شهرا باستثناء الأشرطة المطاطية التي يتم توفير ضمان لها لمدة 3 أشهر. يسري الضمان بشرط أن يكون المستخدم قد اتبع جميع التعليمات ونصائح العناية.

الاستخدام / تعليمات الاستخدام:

افحص المنتج بعناية قبل الاستخدام ولا تستخدمه إذا كانت هناك أي علامة واضحة على التآكل أو أي نوع من الضرر في أي جزء منه. تأكد من استخدام المقاس الصحيح (انظر جدول المقاسات).

1.



2.



3.



4.



5.



يتم تثبيت حزام الكاحل على الجزء الخارجي من الجورب (وليس مباشرة على الجلد) باستخدام أشرطة الفيلكرو. يتم إدخال خطافين معدنيين في ثقبين في الحذاء (العينات). يُركب الخطاف الأحادي البديل بين لسان الحذاء وأربطته. يطوى الشريط المطاطي إلى النصف ويمرر عبر حلقة D الموجودة على حزام الكاحل، ثم يُثبت في الخطاف/الخطافات. يتم تثبيت نهايات الفيلكرو الخاصة بالشريط المطاطي على جانبي حزام الكاحل. تحدد قوة الرفع للشريط المطاطي بواسطة المسافة بين حلقة D وخطاف/خطافات التثبيت، بالإضافة إلى مدى شد الشريط المطاطي. يجب دائما اختبار المسافة المناسبة للخطافات لضمان تحقيق وظيفة الرفع.

عند كل استخدام، تأكد من أن أدوات التثبيت في حزام الكاحل والحذاء مثبتة بشكل صحيح، وأن جميع الأجزاء سليمة. يجب استبدال الشريط المطاطي عند الحاجة، وبحد

أدنى كل 3 أشهر، أو بشكل أكثر تكرارا في حال الاستخدام المكثف. إذا انقطع الشريط المطاطي أو انفك، أو إذا انفك أحد أدوات التثبيت، فلن يتم دعم القدم، مما يزيد من خطر تعثر أو سقوط المستخدم.

يجب دائما توفر شريط مطاطي احتياطي.

تنظيف وصيانة المنتج:

*للجلد - استخدم قطعة قماش ناعمة ومبللة، ويمكن استخدام كريم للجلد إذا لزم الأمر.

*أغلق أشرطة الفيلكرو عندما لا يكون المنتج قيد الاستخدام. تأكد من عدم وجود جزيئات أو شعيرات عالقة في الفيلكرو.

*تجنب استخدام السوائل القوية (مثل المبيض، الأمونيا، المذيبات... إلخ) والمواد الكاشطة (مثل الفرش، الصوف الفولاذي... إلخ) لإزالة البقع.

*يغسل يدويا بلطف فقط، في درجة حرارة لا تقل عن 30 درجة مئوية.

*اترك المنتج ليجف في الهواء، ولا تستخدم أبدا مصادر حرارة كمساعدة على التجفيف.

*يخزن في مكان جاف، بارد ومظلم، وتجنب البيئات الحارة والرطبة.

*ملاحظة: التعرض لأشعة الشمس يقلل من عمر المطاط اللاتكس (الأشرطة المطاطية).

التخلص من النفايات

يجب التخلص من المنتج وفقا للوائح المحلية المعمول بها.

معلومات أخرى

نوصي بأن يتم وصف المنتج وتعديله من قبل أخصائي رعاية صحية، ويجب تقديم التعليمات بطريقة تضمن فهم المستخدم لها بأمان. معلومات المستخدم مهمة ويجب الاحتفاظ بها طوال فترة استخدام المنتج. يجب الإبلاغ عن أي حوادث خطيرة تتعلق بالمنتج إلى الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقيم فيها المستخدم.

حدود المسؤولية وسوء الاستخدام

يتم الإنتاج باستخدام أفضل التقنيات المتاحة. لا تتحمل شركة Erimed أي مسؤولية إذا تم استخدام المنتج في ظروف غير صحيحة أو تم تعديله/التعامل معه كما هو موضح أدناه:

*عدم الامتثال لتعليمات الشركة المصنعة ولوائح السلامة، أو الاستخدام المخالف لها.

*الاستخدام في غير الغرض المخصص للمنتج.

*التنظيف باستخدام منتجات غير مناسبة أو التخزين غير المناسب.

*استخدام المنتج من قبل أشخاص لديهم حساسية من المواد المستخدمة في التصنيع.

*المنتج غير مقاوم للهب أو للماء.

*تحتوي العبوة على أجزاء صغيرة، والمنتج ليس لعبة.

Erimed International AB

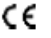



السويد Stensåtravägen 9A, S-127 39 Skärholmen,

الهاتف: +46 8 4495650


البريد الإلكتروني: info@erimed.se


الموقع الإلكتروني: www.erimed.se

مطابقة أوروبية 

جهاز طبي 

يغسل يدويا فقط 

لا يجفف في آلة التجفيف 

لمريض واحد - استخدامات متعددة 

FLEX الإصدار 6

2024/09/12